



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Optishade - это колориметр, оптоэлектронное устройство, которое позволяет измерять цвета в цветовом пространстве зубов. Optishade работает исключительно с iPhone или iPad (данные устройства не входят в комплект).

**ОЧЕНЬ ВАЖНО:** Ваш Optishade - это передовое инновационное устройство, с которым нужно обращаться с особой осторожностью. Гарантия не распространяется на проблемы, возникшие в результате неправильного или неккоректного использования Optishade (гарантия: 1 год).

Made for

Размеры	длина 51 мм диаметр 81,5 мм вес 60 г
Совместим с iOS	iPhone, iPad и iPod Touch Поставляются со следующими двумя кабелями: - Lightning - USB



#70100-OS - 04/2021

Telegram/WhatsApp  
+79163746157,  
[www.stomprom.ru](http://www.stomprom.ru)  
[sale@stomprom.ru](mailto:sale@stomprom.ru)



## КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 Optishade в комплекте с направляющим конусом и калибровочным колпачком
- 1 кабель для подключения OPTISHADE / iPhone-iPad (Lightning)
- 4 направляющих конуса
- 4 калибровочных колпачка
- 1 буклет с инструкциями по использованию и 1 краткое руководство.
- Приложение Optishade (бесплатное), загружается в Appstore
- 30-дневная бесплатная лицензия на ПО Matisse

НЕ СТЕРИЛИЗУЕМО  
СМОТРИ РАЗДЕЛ ЧИСТИКИ И  
ДЕЗИНФЕКЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Калибровочная карта находится внутри калибровочного колпачка. Калибровочная карта очень хрупкая и чувствительная. Ни в коем случае не трогайте его пальцами. Калибровочный колпачок нельзя дезинфицировать или стерилизовать. Если вы не уверены в его чистоте или в случае риска перекрестного заражения, немедленно выбросьте его и возьмите новый.

**ВНИМАНИЕ!** Каждый компонент имеет только одно возможное монтажное положение. Рекомендуется немного потренироваться, чтобы хорошо понимать принципы её установки.

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не пытайтесь открыть корпус Optishade. Он запечатан, и факт его вскрытия аннулирует гарантию производителя. Остерегайтесь попадания жидкости внутрь корпуса вашего Optishade.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО!** Гарантия производителя не распространяется на любые повреждения, вызванные попаданием жидкости в корпус вашего Optishade.



## Краткое руководство пользователя



Smile Line ☺  
made in switzerland

1. Полностью зарядите устройство.





2. Загрузите бесплатное приложение Optishade из App Store.

 Download on the  
App Store



3. Подключите Optishade к устройству iOS и следуйте инструкциям приложения.

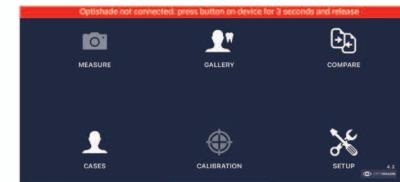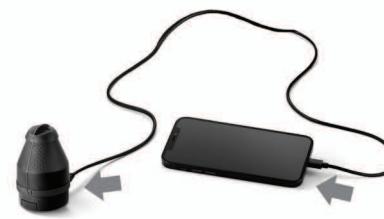

4. Откалибруйте, снимите крышку и начните измерение.

